

REF 6001

Polijstpad

Beoogd gebruik

De polijstpad, dat is ontwikkeld voor stijve endoscopen, beschikt over een polijstoppervlak dat ervoor zorgt dat vuil van de lens kan worden verwijderd.

Waarschuwingen

- Alleen gebruiken met stijve endoscopen.
- NIET gebruiken op zeer hete oppervlakken.
- NIET gebruiken met chemicaliën of oplosmiddelen.
- GEEN wijzigingen aan de pads aanbrengen.
- De scoop NIET buigen tijdens het polijsten.

In het geval van een incident

Elk ernstig voorval met betrekking tot dit hulpmiddel dient te worden gerapporteerd aan de fabrikant en de relevante autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt zich bevindt.

Afstoting

Afvoeren in overeenstemming met de richtlijnen van de instelling en de gemeentelijke richtlijnen.



Domicomed.com/eifu





Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swata, BKR 4013 Malta



Casus Switzerland GmbH, Hinterbergstrasse 49,
6312 Steinhausen, Switzerland



Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430
USA
1.800.750.5300
www.domicomed.com

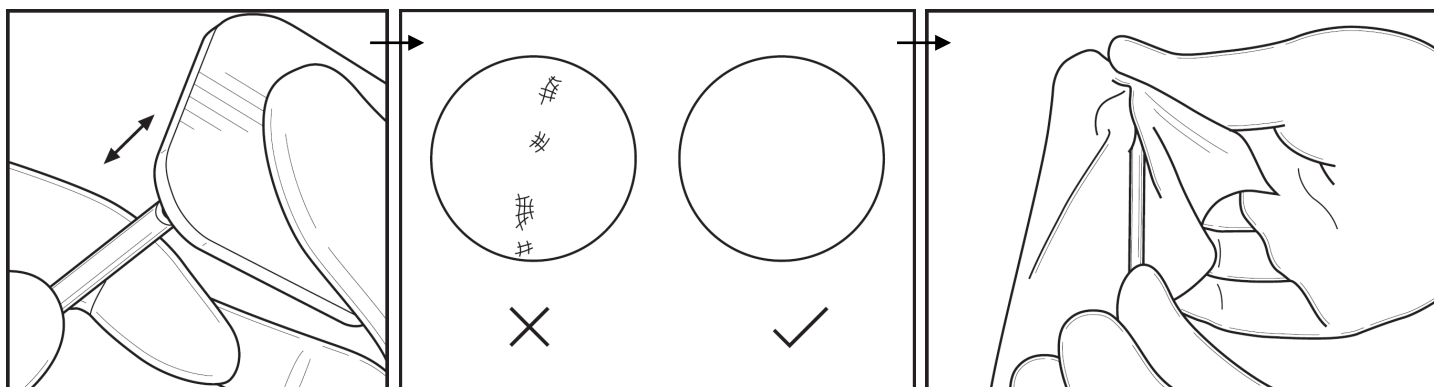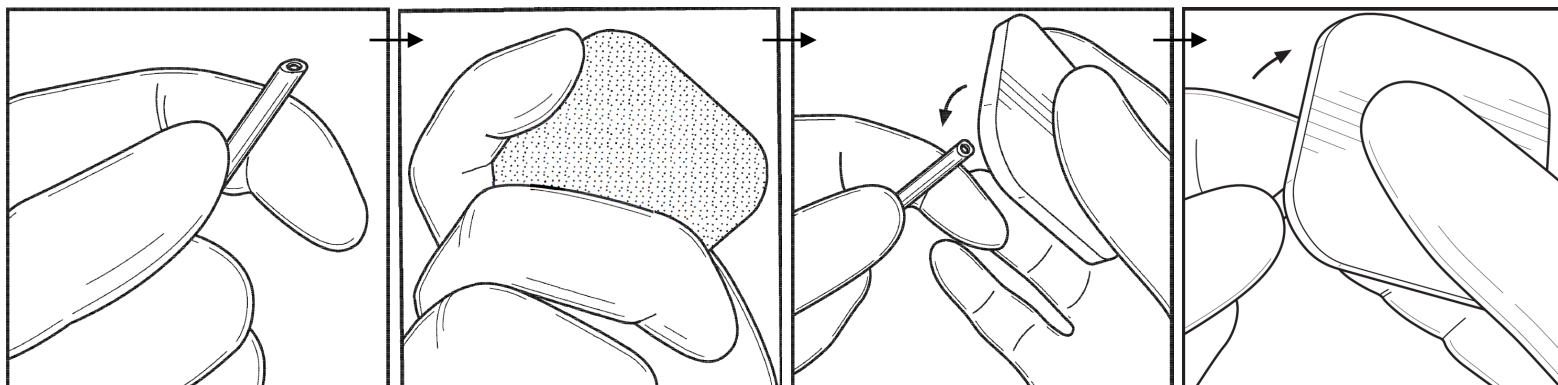

Optioneel

