

REF 6002

Niet-steriele polijstpad

Beoogd gebruik

De niet-steriele polijstpad, speciaal ontwikkeld voor stijve endoscopen, beschikt over een polijstoppervlak dat bijdraagt aan het verwijderen van vuil van de lens.

Waarschuwingen

- Alleen gebruiken met stijve endoscopen.
- NIET gebruiken op zeer hete oppervlakken.
- NIET gebruiken met chemicaliën of oplosmiddelen.
- GEEN wijzigingen aan de pads aanbrengen.
- De scoop NIET buigen tijdens het polijsten.

In het geval van een incident

Elk ernstig voorval dat met dit hulpmiddel te maken heeft, dient te worden gerapporteerd aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt zich bevindt.



Domicomed.com/eifu



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swata, BKR 4013 Malta



Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430
USA
1.800.750.5300
www.domicomed.com

