

**REF 6002**

Tampone lucidante non sterile

## Destinazione d'uso

Il tampone lucidante non sterile, progettato per l'utilizzo su endoscopi rigidi, è dotato di una superficie che contribuisce a ridurre l'accumulo di residui sulla lente.

## Avvertenze

- Utilizzare esclusivamente con endoscopi rigidi.
- NON utilizzare su superfici molto calde.
- NON utilizzare con sostanze chimiche o solventi.
- NON apportare modifiche ai tamponi.
- NON piegare l'endoscopio durante la lucidatura.

## In caso di incidente

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione a questo dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utente e/o il paziente.



[Domicomed.com/eifu](http://Domicomed.com/eifu)



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2<sup>nd</sup> Flr., Tower Street,  
Swata, BKR 4013 Malta



Domico Med-Device, LLC  
14241 North Fenton Rd.  
Fenton, MI 48430  
USA  
1.800.750.5300  
[www.domicomed.com](http://www.domicomed.com)

